


So messen Sie Ihren Augenabstand richtig!

1. Schablone auf etwas dickerem Papier ausdrucken. Messen Sie zur Kontrolle des Maßstabes die Millimeterskala mit einem Lineal nach.
2. Wenn der Maßstab in Ordnung ist, dann falten Sie das Blatt entlang der Mittellinie ① und schneiden Sie dann die Schablone an der Außenlinie ② aus.
3. Schneiden Sie die grauen Flächen ③ aus der Schablone aus!

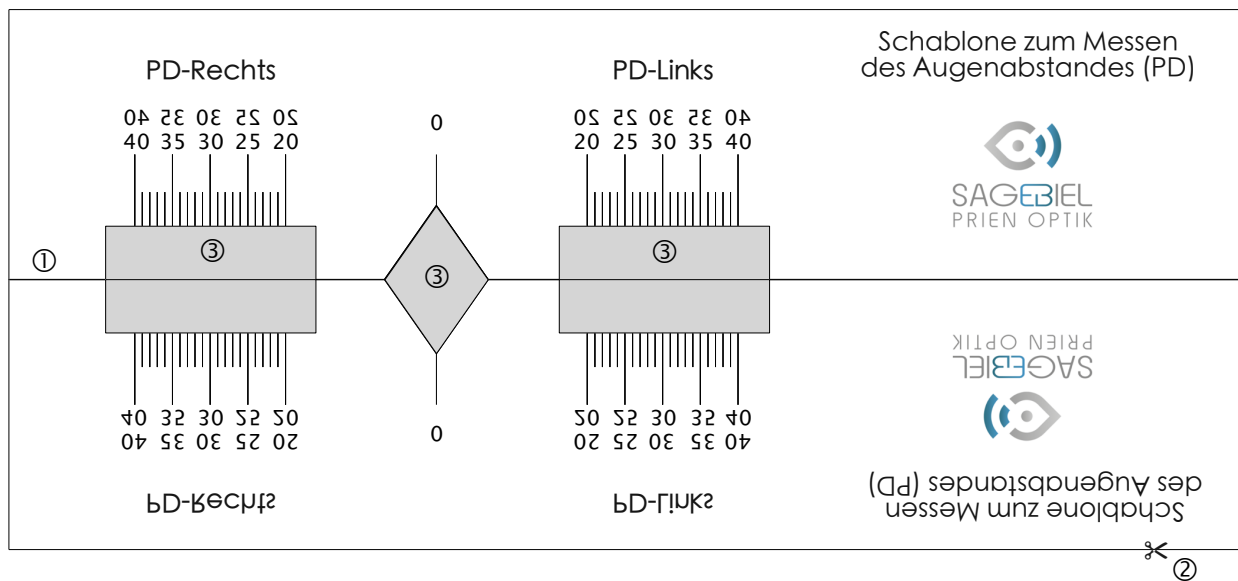

Gehen sie wie folgt vor:

1. Messen Sie Ihren Augenabstand wie auf der Abbildung zu sehen.
2. Sie können entweder alleine vor einem Spiegel oder mit der Hilfe einer weiteren Person, die Werte ablesen.

Die Linie

Pupillenmitte – Skala Lineal

ist für die Messung entscheidend.

